

# Fittner TOUCH & GO

compact massage device for warming-up, recovery and muscle relaxation



WE CARE U SPORT.

## Wat biedt de Fittner TOUCH & GO jou?

- *Ideaal om mee te nemen naar trainingen, wedstrijden, de sportschool of op reis.*
- *Eenvoudig in gebruik en te bedienen met het LCD display (TOUCH & GO).*
- *Ergonomisch, snoerloos en lichtgewicht ontwerp.*
- *AI-mode. De Fittner TOUCH & GO bevat een intelligente minichip waardoor de kracht zich automatisch aanpast aan de druk van de hand.*
- *4 verschillende opzetstukken voor een grote diversiteit aan massagetoepassingen.*
- *4 massagestanden voor lichte tot diepere en intense massages.*
- *Krachtige en stille motor met hoog vermogen.*
- *Een geluiddempende functie (triple noise reduction).*
- *Een bijgeleverde lichte en stijlvolle beschermcase.*

De Fittner TOUCH & GO is een compact en licht massageapparaat waarmee je jouw spieren kunt verzorgen en behandelen. Door het compacte formaat is de Fittner TOUCH & GO ideaal om mee te nemen naar je training of op reis! Met de 4 verschillende niveaus van snelheid kun je jezelf een diepe vibratiemassage geven door snelle en korte stoten (percussies). Deze massage zorgt voor een sneller en effectiever herstel van je spieren na wedstrijden en intensieve trainingen. Het massageapparaat kan je helpen om spierpijn en stijfheid te verlichten, waardoor je sneller klaar bent voor je volgende sportprestatie. De Fittner TOUCH & GO is het ideale compacte massageapparaat voor een aangename massagebehandeling vóór of na het sporten, waar je ook bent!

## Toepassingen

Een massage met de Fittner TOUCH & GO:

- Verlicht pijn en ongemakken aan zacht weefsel door bijvoorbeeld intensieve training.
- Bevordert een gezonde doorbloeding en circulatie in je spieren.
- Ontspant en verlicht stijve nek- en rugspieren.
- Ondersteunt de warming-up, doorbloeding en activatie van de spieren. Draagt hierdoor bij aan blessurepreventie.
- Bevordert het herstelproces en vermindert de hersteltijd.
- Versnelt de afvoer van melkzuur in de spieren.
- Vermindert spierpijn en stijfheid en maakt spierknopen los.
- Vergroot de flexibiliteit, mobiliteit en het bewegingsbereik.

## Productinformatie

- Artikelnr: 89-600002

## Inhoud verpakking

Luxe beschermcase met:

- Fittner TOUCH & GO
- 4 verwisselbare opzetstukken (massagekoppen)
- USB-C kabel voor opladen
- Gebruiksaanwijzing

## Gebruiksaanwijzing en specificaties

Zie achterzijde ►



## Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing, deze is te vinden onder downloads. Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten per keer.

1. Laad de Fittner TOUCH & GO volledig op voor het eerste gebruik met de bijgeleverde USB-C kabel. Zet het apparaat uit tijdens het opladen.
2. Plaats afhankelijk van je voorkeur en massagedoel één van de vier massage opzetstukken op het apparaat.
3. Houd de multifunctionele knop (G) gedurende één seconde ingedrukt om de Fittner TOUCH & GO aan te zetten.
4. Druk nogmaals kort op de multifunctionele knop (G) om de massage te starten. Elke volgende druk op de knop verhoogt de trillingsterkte met één niveau. Het vijfde niveau is de AI-mode.
5. Tijdens gebruik zal de indicator (E) het huidige drukniveau in real-time weergeven. Er zijn drie krachtniveaus.
6. Houd de multifunctionele knop gedurende één seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

## Specificaties

- 2500 mAh batterij, batterijduur tot 16 uur.
- Anti-slip polsband.
- Compact model: 14,2 cm in de lengte.
- Lichtgewicht: 0,5 kg.
- LCD display.
- 1 jaar garantie.

Scan de QR-code voor meer informatie over het juiste gebruik van de Fittner TOUCH & GO.



WE CARE U SPORT.