

Tape Remover

adhesive remover spray



WE CARE U SPORT.

Wat biedt de Tape Remover jou?

- Helpt sporttape, kinesiotape, medical tapes en pleisters makkelijk, snel en comfortabel te verwijderen.
- Voorkomt beschadiging van de huid door tape verwijderen.
- Werkt binnen enkele seconden.
- Gebruiksvriendelijk: hygiënisch en huidvriendelijk. Werkt ook op de kop.
- Voorkomt het achterblijven van lijmresten op je huid.
- Aangenaam hulpmiddel voor sporters, fysiotherapeuten, sportmassieurs en sportverzorgers die vaak tappen.

De Tape Remover van U-Sport is een effectief hulpmiddel voor verwijdering van sporttapes, kinesiotapes en klevende windsels. De adhesive remover spray lost de kleeflaag van tapes op waardoor je sporttape en andere soorten medische tapes snel en zonder ongemak verwijdert van je huid. De spray is makkelijk en hygiënisch aan te brengen, werkt snel en verwijdert tapes zonder je huid te beschadigen. Deze tapeaccessoire is een aangenaam hulpmiddel voor sporters, fysiotherapeuten, sportmassieurs en sportverzorgers die vaak tappen. De U-Sport Tape Remover mag niet ontbreken in de sporttas, verzorgingstas en kleedkamer.

Toepassingen

- Verwijdering van sporttapes en klevende bandages van de huid.
- Voorkomen van beschadiging van de huid.
- Aangenamer gebruik van sporttapes en klevende bandages.
- Verwijderen van lijmlagen op tapingbanken en tapingaccessoires.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik de Tape Remover voorafgaand aan het verwijderen van tapes en bandages van de huid.

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Spray het product gedurende 5-7 seconden, op 20-30 cm afstand, in een draaiende beweging op de tape/lijmlaag.
3. Laat het product even inwerken op de tape.
4. Verwijder daarna voorzichtig de tape.

Tip: om dikke lagen sporttape te verwijderen tussentijds opnieuw sproyten. Gebruik de spray eventueel opnieuw wanneer de tape nog teveel trekt aan de huid. De Tape Remover kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de **U-Sport Athlete Sports Tape** en de **Athlete Kinesio** Tape te verwijderen.

Scan de QR-code voor meer informatie over het juiste gebruik van de Tape Remover, inclusief een instructiefilmpje!

Productinformatie

- Volume: 200 ml
- Artikelnr: 78-200004

Inhoud verpakking

- Aerosol 200 ml
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinformatieblad

- Op te vragen via: info@u-sport.com



Instructiefilmpje





WE CARE U SPORT.