

Ultimate Recover Knee

cold compression therapy for knee injuries



WE CARE U SPORT.

Wat biedt Ultimate Recover Knee jou?

- Twee therapieën in één behandeling: koude- en compressietherapie.
- Bevordering herstel van knieblessures en overbelasting van de knie.
- Verlichting van pijn, voorkoming en vermindering van zwellingen.
- Ondersteuning van behandeling van gewrichtsklachten door gewrichtsontstekingen (arthritis), zoals reumatische aandoeningen.
- Vermindering spiervermoeidheid en spierpijn.
- Ondersteuning bij herstel van verrekkingen en verstuikingen.
- Ondersteuning van herstel na een knieoperaties en bij de revalidatie.
- Door het kunnen geven van compressie sluit de brace perfect aan op de knie en dringt de koude werking dieper door.

De innovatieve Ultimate Recover Knee combineert de verkoelende verlichting van koudetherapie met de gerichte steun van compressie. Dit zorgt voor effectieve pijnverlichting, vermindering van zwelling en bevordering van het herstel van verrekkingen, verstuikingen en andere knieblessures. Perfect voor sporters met een acute knieblessure of chronische knieproblemen die niets liever willen dan snel en effectief terugkeren naar hun sport!

De Ultimate Recover Knee beschikt over een ademende nylon bandage die niet alleen uiterst comfortabel zit, maar ook pijn verlicht en het herstelproces ondersteunt. Pas de druk aan met het handige compressiepompje naar jouw persoonlijke comfort, voor een effectieve behandeling en een pasvorm die perfect aansluit op de knie.

De bandage wordt geleverd met een uitneembaar en herbruikbaar gel pack. De gel pack is ook los te bestellen. Zo heb je altijd een extra gelpack achter de hand, klaar om gebruikt te worden. Ervaar de Ultimate Recover Knee en bevorder je herstel, zodat je zo snel mogelijk je favoriete sport weer kunt beoefenen!

87-400042



Productinformatie

- Artikelnr.: 87-400031 (Ultimate Recover compleet)
- Artikelnr.: 87-400042 (gel pack los)

Inhoud verpakking

- Ultimate Recover Knee
- Gebruiksaanwijzing op achterzijde omdoos

Gebruiksaanwijzing

Zie achterzijde ►

Meer informatie 

87-400031




Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

(1) compressieband (2) gel pack
(3) pomp met slang (4) ontluuchtingsknop

1. Leg ten minste 2 uur voor gebruik het gel pack (2) in de koelkast of vriezer.
2. Breng het gel pack (2) met de achterzijde (voorzien van klittenband) aan op de compressieband (1).
3. Plaats de band in het midden van het dijbeen (A), waarbij het gat wordt gericht op het kniegewricht (B).
4. Wikkel de uiteinden van de band (afb. 1) rond uw knie en bevestig deze met klittenband in de gewenste positie (afb. 2).
5. Sluit de slang (3) aan op de AAN/UIT schakelaar en draai deze op het tweewegventiel.
6. Zet de schakelaar in de AAN-positie.
7. Begin met pompen (voor compressie) en verhoog de druk rondom de knie*. Om het compressieniveau te verlagen: druk de ontluuchtingsknop (4) in totdat het gewenste compressieniveau is bereikt.
8. Zet op het gewenste compressieniveau de schakelaar in de UIT-positie en draai de slang vervolgens los.
9. Pas de compressietherapie gedurende 5 tot 10 minuten toe. Verwijder de compressiebandage daarna gedurende 5 tot 10 minuten en herhaal indien gewenst tot maximaal 4 keer per dag.
10. Laat de lucht ontsnappen uit de compressieband voordat u de band afdoet; druk op de ontluuchtingsknop (4).

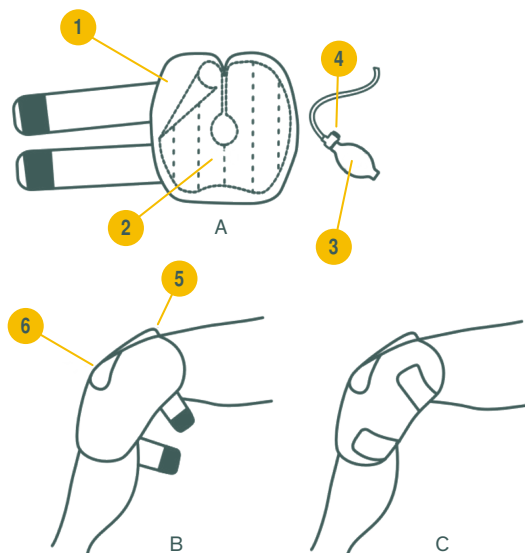

* Voorkom overcompressie; overmatige druk kan bloedsomloopstoornis veroorzaken

Dit medisch hulpmiddel maakt toepassing van de **RICE**-methode mogelijk; **R**ust – **I**js/Koelen – **C**ompressie – **E**levatie (hoog houden van geblesseerde ledemaat). De RICE-methode wordt **aanbevolen door sportverzorgers en fysiotherapeuten** voor de eerste fase van je sportblessure.

Scan de QR-code voor meer informatie over het juiste gebruik van de Ultimate Recover Knee!



WE CARE U SPORT.